

Till veterinären om provtagning för SH-test!

SH-testet är en validerad risktest för Histiocytärt sarkom (fransk: Sarcome Histiocyttaire). Testet utförs av det franska laboratoriet Antagene. Här är den muterad genen PTNP11 involverad och kopplad till den disseminerade formen av Histiocytärt sarkom, som även visat sig vara samma mutation på humansida.

Vad behöver du som veterinär göra.

1. Identifiera hunden med chipläsare.
- 2 Fylla övre delen av remissen med identifikation, samt den delen med datum, stämpel och signatur.
3. Ta ett **EDTA-rör** med blod. Märk röret med hundens Chip-nr: (15-siffriga) eller namn.

Undantaget är när man beställt swabbar och rör – till valpar under 3 månader – då finns det ett nummer på röret. Dessa skall vara till rutorna överst på remissen Tube No. XXXXXXXX

OBS! det går inte att swabba en valp över 3 månader!

4. EDTA-röret läggs i en transporthylsa av plast innehållande en absorberande duk.

5. Detta kan hundägaren ombesörja

Hylsan, remiss, avtalsmemorandum och kopia av stamtavlan läggs sedan i ett vadderade kuvert och postas till:

ANTAGENE

6 allée du Levant

CS 60001

69890 La Tour de Salvagny

France